

Original SmartPegs od Osstell

Nyní k dispozici také
v opakovaně použitelné
verzi



SmartPeg **na jedno použití**
SmartPeg **pro opakované použití**

Důvěřujte naměřené hodnotě Jediné skutečné hodnotě

SmartPegs jsou součástí původního konceptu Osstell ISQ a využívají osvědčenou metodu RFA k měření stability implantátu. Objevte, jaký rozdíl znamenají spolehlivé hodnoty ISQ – a proč jsou SmartPegs osvědčenou volbou pro zubní lékaře po celém světě.

Proč SmartPegs od Osstell?

Původní stupnice ISQ. Nejlépe zdokumentovaná.

Osstell je tvůrcem stupnice ISQ, celosvětově nejvíce klinicky ověřeného řešení pro měření stability implantátů.



Najděte dostupné opakovaně použitelné SmartPegs

SmartPegs jsou zatím k dispozici jako opakovaně použitelná verze pro vybrané implantační systémy. Dostupnost závisí na schválení na místním trhu. Naskenujte QR kód nebo navštivte stránku osstell.com/news/find-the-available-reusable-smartpegs/, kde najdete aktuální seznam dostupných opakovaně použitelných SmartPegs.



Nejste si jisti, který SmartPeg je vhodný pro váš implantát?

Využijte náš online nástroj **Find my SmartPeg** a zjistíte, jaký typ a verze je vhodná pro váš implantační systém.



Přehled hlavních výhod a benefitů



Vyrobeno z
hliníku



Pro **ochranu**
přesného a citlivého
napojení implantátu



Na základě
původní
ISQ technologie



Pro **jistotu**
a **flexibilitu**



Vědecky
validované



Pro vysokou
spolehlivost
výsledků měření



Důvěryhodnost
každého
měření



Pro vysokou
diagnostickou
jistotu



Výhody



Benefity



Dvě verze

Jedno osvědčené řešení

Sterilní jednorázový nebo opakovaně použitelný SmartPeg. Volba je na vás. Plná flexibilita při zachování stejné přesnosti ISQ a bez nutnosti používat převodní tabulky.

SmartPeg na jedno použití

Dodáváno sterilní, připravené k použití

Pro klinické lékaře, kteří upřednostňují jednorázové řešení, zůstává jednorázový SmartPeg nejjednodušší volbou, protože je dodáván ve sterilním balení a je připraven k okamžitému použití. Díky širokému globálnímu pokrytí implantačních systémů nabízí maximální flexibilitu a je kompatibilní se stovkami různých implantátových systémů.

Hlavní vlastnosti:

- › Dodáváno sterilní a připravené k použití
- › Eliminuje jakékoli riziko chyb při opakovaném použití
- › Široké globální pokrytí Osstell s implantačními systémy

SmartPeg pro opakované použití

Až 20 ověřených cyklů reprocessingu


Stejná osvědčená přesnost ISQ. Nový opakovaně použitelný SmartPeg je vyroben ze stejného hliníkového materiálu jako sterilní verze na jedno použití, což zaručuje plnou kontinuitu s rozsáhlou klinickou dokumentací podporující původní metodu ISQ.

Hlavní vlastnosti:

- › Až 20 ověřených cyklů opakovaného použití
- › Stejná přesnost ISQ jako u sterilního jednorázového SmartPeg
- › Laserové značení typu a čísla šarže pro jasnou identifikaci
- › Černý magnet pro snadnou orientaci při měření a jasné odlišení od sterilní jednorázové verze
- › Ochranný povlak povrchu pro dlouhodobou funkčnost

REUSABLE

Vaše prémiová volba pro stabilitu implantátů: Osstell Beacon

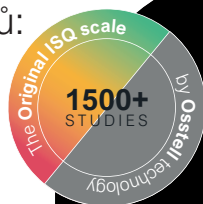

Osstell Beacon umožňuje přesné a efektivní posouzení stability implantátu, což z něj činí ideální volbu pro moderní zubní ordinace. Díky intuitivnímu navádění ve formě semaforu a měření stability zubních implantátů v reálném čase poskytují cenné informace, které pomáhají při informovaném klinickém rozhodování a usnadňují plánování léčby.

Pro ještě větší pohodlí zahrnuje Osstell Beacon službu **OsstellConnect**, bezplatnou cloudovou platformu, která nabízí cenné analytické přehledy, vylepšenou komunikaci s pacienty a zjednodušenou dokumentaci.



Hledáte základní variantu? Seznamte se s Osstell Classic

Pro spolehlivé měření stability implantátů bez zbytečných funkcí představuje Osstell Classic praktické a jednoduché řešení. Využívá vědecky podloženou technologii RFA od společnosti Osstell, která umožňuje objektivní a opakovatelné hodnocení stability a podporuje tak klinické rozhodování.




Váš kompas pro zubní chirurgii zítřka

W&H Oral Surgery Compass slouží jako praktický průvodce jednotlivými kroky ošetření v oblasti ústní chirurgie a implantologie – od diagnostiky a léčby až po finální dokumentaci.



Digitální technologie přinášejí revoluci do stomatologické péče. Díky optimální integraci přístrojů, softwaru a digitálních procesů pomáhá společnost W&H uživatelům zajistit, aby každý krok léčby byl efektivní, bezpečný a zaměřený na pacienta. Produkty W&H vzájemně spolupracují, jsou propojené a doplňují se.

Porovnání **jednorázových** **vs. opakovaně použitelných** SmartPegs

Specifikace	SmartPeg na jedno použití	SmartPeg pro opakované použití
Manipulace:	Sterilní, připravené k použití	Nesterilní, vyžaduje validované čištění & sterilizaci
Odpad:	Více odpadu na jedno použití	Postupem času méně odpadu
Odpad:	Jeden peg na jedno ošetření	Několik ošetření, až 20krát
Přesnost ISQ:	Konzistentní	Konzistentní
Sortiment:	Kompletní sortiment	Zahrnuje všechny přední značky implantátů
Balení:	Balení po 5 kusech, blistr	1 kus, plastové pouzdro
Datum expirace:	5 let	Bez data expirace
	Nejste si jisti, který SmartPeg je vhodný pro váš implantát? Využijte náš online nástroj „ Find my SmartPeg “ a zjistíte, jaký typ a verze SmartPeg je vhodný pro váš implantační systém.	



Výrobce:

Osstell AB
Stampgatan 14
411 01 Göteborg, **Sweden**
t +46 31 340 82 50
info@osstell.com
osstell.com